

Hur du parkopplar och länkar din nya SMARTSÄNDARE




Förberedelser

Du kommer att parkoppla din **nya** Eversense 365-sändare med Eversense 365-appen. Därefter länkar du sändaren till din sensor. Den här guiden beskriver hur du gör för att länka sändaren både till en **befintlig sensor** och till en **ny sensor**.

- **Välj en lämplig tidpunkt.**
Länkning kommer att placera ditt system i initieringsfasen (**för befintlig sensor**) eller uppvärmningsfas (**för ny sensor**).
- **Säkerställ att din nya sändare är fulladdad.**
- **Dubbelkolla att du har tillgång till internet från din mobila enhet.**
- **Notera dina personliga CGM-inställningar med din gamla sändare i Huvudmeny > Inställningar.**
Efter att du har parat ihop din nya sändare med din mobilapp måste dina personliga CGM-inställningar återställas.

TRYCK HÄR för att se glukosvarningsnivåer, glukosmålnivåer och andra varningar.

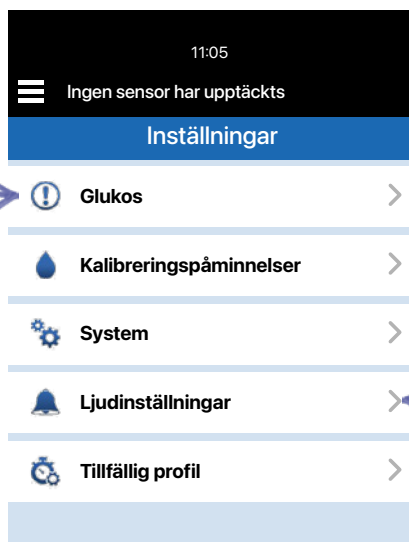

TRYCK HÄR för att se varningsljud, inställningar för snooze, inställningar för sändarens fränkoppling och om funktionen Stör ej är aktiverad eller inte.

- **Om du byter ut din sändare ska du koppla bort den gamla sändaren från mobilappen och från Bluetooth-inställningarna.**
 - Från din Eversense 365-app, gå till **Meny > Anslut**. Tryck på den gamla sändarens serienummer för att koppla från.
 - För att ta bort från Bluetooth-inställningarna går du till **Inställningar > Bluetooth** på din mobila enhet och fränkoppla eller glöm den här enheten på den gamla sändaren.
- **Kontrollera att din gamla sändare inte kommunicerar med din mobila enhet.**
 - Anslut den gamla sändaren till laddaren under tiden.
 - Alternativt, stäng av den gamla sändaren genom att trycka på strömknappen och håll ned tills den vibrerar (ca 5 sekunder).


De olika stegen för byte av smartsändare

1 Parkoppla ny sändare

- I Eversense-appen går du till **Huvudmeny** > **Systeminställning** > **Hjälp mig konfigurera** > **Jag har en ny sändare**.
- **Placera den nya sändaren i parkopplingsläge** genom att trycka på touch-knappen tre gånger tills lampan börjar blinka.
- När sändarens serienummer visas ska du bekräfta att numret matchar det på den nya sändarens baksida.
- Tryck på **Ej ansluten**.
- Acceptera alla behörigheter som din mobila enhet begär – till exempel för Bluetooth, parning och enheter i närheten.
- När parkopplingen är klar, visas **"Ansluten"** bredvid sändarens serienummer. (detta kan ta några minuter.)
- Tryck på **Klart**.

2 Länka ny sändare och sensor

- På sidan **Systeminställningar** trycker du på **Sensor**.
- Placera den nya smartsändaren över sensorn.
 - **Befintlig sensor:** Placera sändaren med ett plåster centrerat över sensorn.
 - Placera sändaren **utan plåster** direkt ovanför sensorn, så att den täcker den övre halvan av bandaget.
- Använd placeringsguiden och flytta smartsändaren för att hitta den starkaste signalen. Håll sändaren på plats och tryck på **Nästa**.
- Tryck på **Ny sensor upptäckt**.
- Håll sändaren på plats över sensorn tills processen är klar och meddelandet **"Länkad"** visas i appen. Detta kan ta flera minuter.
- Tryck på **Nästa**.

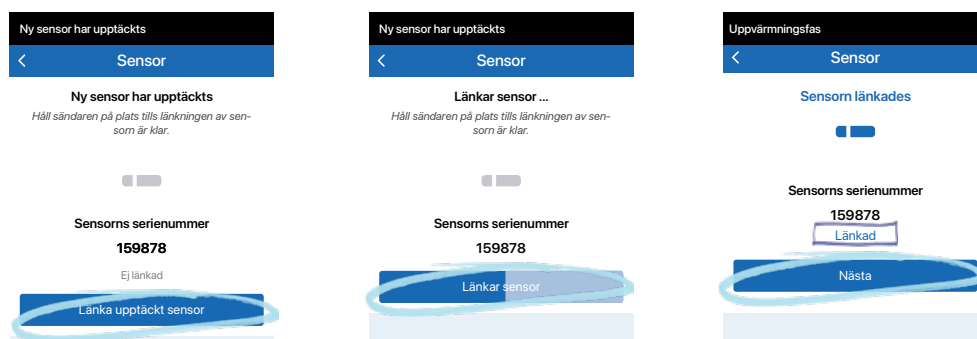

3 Systeminitiering.

- **Befintlig sensor:** Inom 10 minuter efter att din sensor och den nya sändaren har länkats, kommer det första **Kalibrera nu**-meddelandet att visas i din app.
- Under initieringsfasen måste du genomföra 4 kalibreringar, med 2 till 12 tim. mellanrum.
 - Se bruksanvisningen för din Eversense 365 (tillgänglig i appen under **Huvudmeny** > **Systeminställningar** > **Hjälp mig konfigurera**) för en genomgång av systemets uppvärmning eller initiering.
- Du börjar få glukosdata efter att du har slutfört den andra kalibreringen.
- I början kommer du att vara i en 24-timmars uppvärmningsfas. Under denna period kan du antingen ansluta sändaren till laddaren eller stänga av den. Du kommer att få en notifikation i mobilappen när uppvärmningsfasen är över. När uppvärmningen är klar kan du placera sändaren med plåster över sensorn. Systemet kommer då att gå in i initieringsfasen (se ovan).

4 Kontrollera CGM-inställningarna.

- Gå till **Huvudmeny** > **Inställningar** i Eversense-appen och uppdatera de personliga inställningarna efter behov.