

Eversense 365 NÄSTA STEG



Så tar du hand om snittområdet för korrekt läkning



- Undvik att bada eller blöta ned snittområdet i minst 5 dagar. Att duscha går bra, men undvik att spruta vatten direkt på snittområdet.
- Skydda snittområdet från fukt och svett. Undvik fysisk ansträngning som belastar såret då det riskerar att gå upp. Tjänjning på såret försämrar också sårhäkning.
- Tegaderm™ ska sitta på i minst 5 dagar. Om det lossnar innan dess ska du byta ut det. Var försiktig så att du inte drar loss Steri-Strips™ när du tar bort Tegaderm™-förbandet.
- Låt Steri-Strips™ sitta kvar tills de ramlar av.
- Klipp av kanterna på Steri-Strips™ om de börjar rulla upp sig, men ta inte bort dem helt.

Meddela din vårdgivare om:

- Steri-Strips™ lossnar innan snittet har läkt helt.
- Du får feber eller upplever smärta, rodnad, svullnad, värme eller läckande vätskor vid området för snittet.

Observera: Om du behöver byta ut din Tegaderm™ måste du vara extra försiktig så att Steri-Strips™ inte dras av.

Läs noga avsnittet **Fördelar och risker i bruksanvisningen till ditt Eversense 365.**

DAG ETT: KOM IGÅNG

- Läs den bifogade **Bruksanvisningen** och **Snabbguiden**.
- Ladda ner Eversense 365-appen och parkoppla din sändare med din mobila enhet.
- Länka din sensor och smartsändaren och påbörja uppvärmningsfasen på 24 timmar.
- Ställ in varningnivåerna för dina glukosvärden tillsammans med din vårdgivare.
- Stäng av din sändare – du behöver inte bära den förrän du påbörjar initieringsfasen.

DAG TVÅ: INITIERINGSFAS BÖRJAR

- Placera sändaren på det dubbelhäftande plåstret och placera den över sensorn där signalen är som starkast. Slutför 4 initieringskalibreringar med 2 till 12 timmars mellanrum.
- Efter den andra godkända kalibreringen kommer du att börja se dina glukosdata.

DAG TRE OCH DÄREFTER: FASEN FÖR SYSTEMINITIERING BÖRJAR

- Daglig kalibreringsfas börjar. Kalibrera en gång dagligen i 13 dagar.
- Från dag 14 kommer du att kalibrera den en gång i veckan.
- Följ stegen i bruksanvisningen för att dela CGM-data med din vårdgivare

VEM MAN SKA KONTAKTA VID FRÅGOR

- Kontakta vårdgivaren som gjorde din procedur för frågor angående din insättningsplats.
- Kontakta vårdgivaren som ordinerade Eversense för frågor om diabeteshantering.
- För tekniska frågor eller hjälp att komma igång med Eversense, kontakta Ascensia Diabetes Cares kundsupport på telefonnummer: **020 83 00 84**.



Se instruktionsfilmer på vår hemsida genom att scanna QR-koden.