

FÖRBERED DIG inför ditt CGM-besök

Grattis till att du har börjat din resa med Eversense 365.
Låt oss komma igång!

INNAN besöket

Följ stegen för att komma igång i Eversense snabbguiden
(global.eversensed diabetes.com)

- Ladda ner den kostnadsfria Eversense 365-appen från App Store® eller Google Play™ på din kompatibla mobila enhet.

• Ladda ner den här appen →



- Tryck på Eversense CGM-ikonen för att starta appen och följ sedan instruktionerna för att skapa ditt Eversense CGM-konto

- Välj "Jag har ingen smartsändare" på välkomstskärmen
- Låt mmol/L vara inställt på skärmen Måttenhet
- Skriv ned användarnamnet (e-postadress) och lösenordet för ditt konto:

e-post: _____

lösenord: _____

- När du har skapat ditt konto får du ett e-postmeddelande. Klicka på länken i e-postmeddelandet inom 72 timmar för att aktivera ditt konto.

PÅ DAGEN FÖR besöket

- Bär en löst sittande, kortärmad eller ärmlös tröja
- Ta med följande till besöket:
 - Användarnamnet (e-postadress) och lösenordet för ditt Eversense-konto
 - Din mobila enhet, fulladdad och med Eversense 365-appen installerad.
- Återgå till dina vanliga vardagsaktiviteter. För att du ska läka ordentligt rekommenderar vi dock att du inte badar, simmar eller ägnar dig åt ansträngande aktiviteter under de fem första dagarna.

Har du några frågor? Vi finns här för dig!
Ring Ascensia Diabetes Cares kundsupport
på 020 - 83 00 84 eller skicka e-post till
eversense.se@ascensia.com.

© 2024 Senseonics, Inc.
Med ensamrätt.
© 2024 Ascensia Diabetes
Care Holdings AG.
Med ensamrätt.



Distribueras av
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Gustav III:s Boulevard 34,
plan 4, 169 73 Solna
Eversense kundsupport
020 - 83 00 84
www.diabetes.ascensia.se

Tillverkad av Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA

Eversense[®] 365-systemet för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer i upp till ett år hos personer (från 18 år) med diabetes. Systemet är avsett för användning för att ersätta blodsockermätningar (BG) med fingerstick för beslut om diabetesbehandling. Mätningar av blodsocker med fingerstick krävs för kalibrering en gång i veckan efter dag 13 och när symtomen inte stämmer överens med CGM-informationen eller när man tar läkemedel i klassen tetracyklin. Procedurerna för insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. För att få tillgång till Eversense 365 CGM-system krävs en förskrivning från en vårdgivare. För mer information, kontakta din vårdgivare eller Ascensia Diabetes Cares kundsupport.

För säkerhetsinformation, se bit.ly/eversensesafety

Eversense, Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring och logotypen Eversense är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia och logotypen Ascensia Diabetes Care är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare och används enbart för informativa syften. Inget samband eller garanti ska antydvas eller inbegripas.
PP-SENS-GBL-0128